

Hydroaktive Wundversorgung - Infizierte akute und chronische Wunden sanieren

UrgoCell Silver

Absorbierende, nicht haftende Polyurethan-Schaumstoffkomresse mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix® (Ag = Silbersalz) und atmungsaktivem Vliesstoffträger aus Polyurethan



- Starke und anhaltende antibakterielle Wirksamkeit gegen ein breites Keimspektrum (gramnegative und grampositive Bakterien), u.a. Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa
- Lokale Freisetzung der Silberionen nur in Kontakt mit dem Wundexsudat
- Gute lokale Verträglichkeit
- Atraumatischer und schmerzfreier Verbandwechsel

Anwendungsgebiete:

Exsudierende Wunden mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion: akute Wunden (z.B. Verbrennungen 2. Grades, Hautabschürfungen, traumatische oder chirurgische Wunden) und chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera)

Anwendung:

- UrgoCell Silver kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen.
- UrgoCell Silver wird mit einem Sekundärverband fixiert (z.B. Urgomull haft latexfrei) und kann auch in Kombination mit Kompressionstherapie (z.B. UrgoK2) angewendet werden.
- Tragedauer 1 bis 3 Tage
- Die maximale Behandlungsdauer mit UrgoCell Silver beträgt einen Monat.

Kontraindikationen:

Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Silber und anderen Komponenten der Wundauflage. Während der Untersuchung mit Magnetresonanztomographen (MRT) muss die Wundauflage entfernt werden.



PZN	REF	Artikel	Abmessungen	Sp.std.bed.
02 426 140	513001	OP à 20 Stück	6 x 6 cm	ja/nein *
06 877 394	513002	OP à 10 Stück	6 x 6 cm	ja/nein *
04 667 379	507592	OP à 10 Stück	10 x 12 cm	ja/nein *
06 607 890	517592	OP à 20 Stück	10 x 12 cm	ja/nein *
04 667 385	517595	OP à 5 Stück	15 x 20 cm	ja/nein *

* ist nicht in allen KV-Bezirken als Sprechstundenbedarf erstattungsfähig

Weiter UrgoClean Ag Vlieskomresse aus antimikrobiellen und hydrosorbierenden Polyacrylatfasern mit mikroadhäsiver TLC-Ag-Wundheilungsmatrix® (Ag = Silbersalz)

UrgoClean Ag-UrgoStart-Set Therapie-Set für exsudierende chronische/chronifizierte traumatische Wunden mit initialem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion

UrgoCell Silver Absorbierende, nicht haftende Polyurethan-Schaumstoffkomresse mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix® (Ag = Silbersalz) und atmungsaktivem Vliesstoffträger aus Polyurethan
 UrgoCell Ag Border Absorbierende Polyurethan-Schaumstoffkomresse mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix® (Ag = Silbersalz), atmungsaktivem Vliesstoff-Träger aus Polyurethan und hautverträglichem Hafttrand

UrgoTül Silver Polyestergitter mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix® (Ag = Silbersalz)

UrgoTül Silver-Start-Set Therapie-Set für chronifizierte traumatische/chronische Wunden mit initialem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion

UrgoTül Ag Lite Border Polyestergitter mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix[®] (Ag = Silbersalz), dünner absorbierender Kompresse, atmungsaktivem Vliesstoff-Träger aus Polyurethan und hautverträglichem Haftrand

UrgoTül S.Ag Polyestergitter mit TLC-Wundheilungsmatrix[®] + Silber-Sulfadiazin

UrgoSorb Silver Calciumalginat mit CMC (Carboxymethylcellulose) und Silberkomplex

[◀ zurück](#)

© 2020 - URGO GmbH - Alle Rechte vorbehalten

URGO GmbH

Justus-von-Liebig-Straße 16 - 66280 Sulzbach - Deutschland

Tel.: +49 (0)6897 / 579-0 - Fax: +49 (0)6897 / 579-212